

Thyreotropin (TSH – senzitivní)

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
Laboratorní příručka OKB					
Seznam základních a speciálních vyšetření					
			platí od: 1.3.2024		
THYREOTROPIN (TSH – SENZITIVNÍ)			TSHS		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: do 1 hod. rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	9,6 %		
Použitá metoda	imunochemická	Jednotka	mU/l		
Referenční meze	<table border="1"><tr><td>sérum</td><td>0,37-5 mU/l</td></tr></table>			sérum	0,37-5 mU/l
sérum	0,37-5 mU/l				
SOP	SOPV 285				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
93195	19764				
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta	Vzhledem k cirkadiánním rytmům odebírejte krev pokud možno vždy ráno nalačno.				
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C	1 den				
Stabilita při 4-8°C	3 dny				

Stabilita při -20°C	3 měsíce
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	během I. trimestru těhotenství se hladina může měnit
Další faktory	<u>hodnoty zvyšuje:</u> stres, tělesná námaha, spánková deprivace, kouření <u>hodnoty snižuje:</u> akutní chorobné stavy, hladovění
Biologický poločas	1 hodina